

Para realizar un análisis de **glucosa** necesitarás las tiras reactivas **GlucoMen[®] areo Sensor** y, para los cuerpos cetónicos, las tiras **GlucoMen[®] areo β -Ketone**.

La técnica a seguir en ambos casos es:

1

**Lavar y secar
correctamente
las manos**



2

Introducir la tira reactiva hasta oír la señal

Tira reactiva glucosa

beep!

Tira reactiva **cuerpos cetónicos**

y **visualizar** el símbolo de la gota de sangre

Glu 14:13 mg/dL
14:13

3

**Masajear
y realizar la
punción en
un lateral**



4

**Acercar
la tira
reactiva
a la gota
de sangre
para que la
absorba**



5

Leer el resultado en la pantalla con **la tira hacia arriba**



beep!



6

Expulsar la tira
de forma segura

beep!



Guía de Inicio



A.MENARINI
diagnostics

¿Qué puedes hacer con el medidor GlucoMen[®] areo 2K?

- Realizar un **análisis de glucosa o cuerpos cetónicos**
- Revisar las **memorias**
- Visualizar el **promedio** de glucosa
- Seleccionar los **marcadores**
- Activar o desactivar la **señal acústica** o pitido
- Establecer **alarmas y alertas**
- Accionar la **conectividad inalámbrica NFC**



Medidor inteligente de
glucosa y cuerpos cetónicos
CONECTIVIDAD INTEGRADA



N)

mg /dL

14:10
19-10

GlucoMen
AREO 2K

Los botones sirven para:

Acceder a:

- **Memorias**
- **Promedios**
- **Confirmar una selección**



Entrar en **configuración** presionando simultáneamente ambos botones

* Para más información consulte el manual de usuario




Medidor inteligente de
glucosa y cuerpos cetónicos
CONECTIVIDAD INTEGRADA

el modo
Calibración*
nando
eamente
botones



**Desplazarse
por:**

- **Memorias**
- **Promedios**
- **Y diferentes
menús de
configuración**

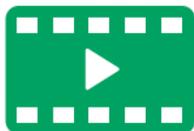

CON SOPORTE DIGITAL

Breves vídeos tutoriales



A.MENARINI diagnostics



Soluciones para la Diabetes

www.solucionesparaladiabetes.com

TELÉFONO GRATUITO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
900 301334

YouTube Soluciones para la Diabetes

@Soluciondiabete