













Symboler / Symboler / Symboler / Symbolit

	Tillverkare / Produzent / Producent / Valmistaja
	Viktigt, läs bruksanvisningen före användning / Advarsel: Les bruksanvisningen / Advarsel, læs bruksanvisningerne før brug / Varo, lue käyttöohjeet
	Katalognummer / Katalognummer / Katalognummer / Luettelonumero
	Satskod / Batch-kode / Batchkode / Eräkoodi
	Förvara vid / Temperaturbegrensning / Temperaturgrænse / Lämpötilarajoitus
	Använd före / Bør brukes innen / Brug inden / Viimeinen käyttöpäivä
	Produkten uppfyller kraven i Eu-direktivet 98/79/EG för medicintekniska produkter för <i>In-vitro</i> diagnostik / CE-merke. Produktet oppfyller kravene i direktivet 98/79/EF om <i>in-vitro</i> diagnostiske anordninger. / CE-mærkning. Produktet opfylder kravene i direktivet 98/79/EF for medicinske produkter til <i>in-vitro</i> diagnostik / Tuote täyttää <i>in vitro</i> -diagnostisia lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 98/79/EY vaatimukset
	Medicinteknisk produkt för <i>In-vitro</i> diagnostik / <i>In-vitro</i> diagnostisk medisinsk utstyr / <i>In-vitro</i> diagnostisk medicinsk apparat / <i>In vitro</i> -diagnostinen lääkinnällinen laite
	Viktiga tillägg eller förändringar från tidigare revision av bruksanvisningen / Viktige endringer i forhold til tidligere revisjoner av bruksanvisningen / Væsentlige tilføjelser eller ændringer fra den tidligere bruksanvisning / Merkittäviä lisäyksiä tai muutoksia edellisen käyttöohjeen tarkistuksen suhteen
	Innehållet räcker till / Tilstrækkelig til / Tilstrækkeligt til / Riittävä
	<i>In-vitro</i> diagnostiskt instrument för självtestning / <i>In-vitro</i> diagnostisk medisinsk utstyr / <i>In-vitro</i> utstyr for selvtestning / <i>In vitro</i> -laite omaseurantaan varten
	Kontrollösningens varaktighet efter att plastflaskan öppnats: 90 dagar / Kontrollösningens varighet etter at plastflasken er åpnet: 90 dager / Kontrolopløsningen er holdbar i 90 dage efter plastflaskens åbning / Kontrolliliuksen käyttöikä muovipullon avaamisen jälkeen: 90 päivää



GlucoMen®

areo

Control

- Glukoskontrollösning
- Kontrolløsninger med glukose
- Blodsukkerkontrolløsninger
- Glukoosin kontrolliliuokset

Tillgänglighet / Tilgjengelighet / Indhold / Saatavuus

REF 46201 GlucoMen® areo Control N:
1 flaska x 2,5 mL / 1 flaske x 2,5 ml / 1 flaske x 2,5 mL / 1 pullo x 2,5 mL

REF 46202 GlucoMen® areo Control H:
1 flaska x 2,5 mL / 1 flaske x 2,5 ml / 1 flaske x 2,5 mL / 1 pullo x 2,5 mL

Utgivningsdatum: Februari 2014
Utgivelsesdato: Februar 2014
Udstedelsesdato: februar 2014
Julkaisupäivämäärä: Helmikuu 2014

 **A. MENARINI DIAGNOSTICS Srl**
Via Sette Santi, 3
50131 Firenze - Italy

Om du har frågor om kontrollösningen GlucoMen® areo Control, kontakta: /
Hvis du har noen spørsmål om GlucoMen® areo Control, kontakta: /
Hvis du har spørgsmål om GlucoMen® areo Control, venligst kontakta: /
Jos sinulla on kysymyksiä tuotteesta GlucoMen® areo Control, ota yhteyttä:

SE DK FI

Distribueras av: / Distribueret af: / Jälleenmyyjä:
A. MENARINI DIAGNOSTICS Srl
Italien filial (Sverige) Medeon Science Park
Per Albin Hanssons väg 41, Hus D
205 12 Malmö - Sverige
Tel. +46-(0)40-321270

NO

Distribuert av:
Med-nett A/S
Terrasseveien 33B på Høvik i Bærum - Norge
Tel. +47 67829000

IVD **CE** 0123

 **A.MENARINI**
diagnostics

