

GlucoMen Areo överför trådlöst blodsockervärden med sk Near Field Communication (NFC). Det är en överföringsstandard för kontaktlöst utbyte av data över korta avstånd (< 1 cm).

Tillverkare som stödjer NFC: Apple iPhone*, Samsung, Sony, HTC, LG, Google, Nokia, Philips, Huawei, m.fl.

*Glucolog lite appen och Hedia appen är kompatibla med Apple iPhone 8 och högre. Det krävs också att din GlucoMen areo mätare med serienummer från EQ493 eller högre. Har du en GlucoMen areo 2K, ska den ha serienummer HC109 eller högre. Har du inte det, kontakta Menarinis kundeservice: Tel 040-32 12 70 eller info@menarinidiagnostics.se.

Detta behöver du:



GlucoMen Areo blodsockermätare



Android smartphone

GlucoMen[®] areo



En dagboks app, t ex GlucoLog Lite eller Hedia

Förberedelser

Aktivera NFC på din Areo (endast första gången).

Håll inne "M"-knappen till det står "SET"



Tryck på pilknapparna tills N)) blinkar



Ändra med pilknapparna till "ON".

Bekräfta med "M".



Aktivera NFC på din smartphone.

Gå in i "Inställningar"

Leta upp "NFC" och "Aktivera"



Starta din app.

Här GlucoLog Lite



OBS! Detta moment är olika i olika appar.

Tryck på symbolen för "hämta data"



Överföring av data

För ihop rygg mot rygg – tills du hör ett pip.



Funkar även med mätaren i väskan!



När "End" visas är det klart!



Instruktionsfilm och mer info om GlucoMen Areo hittar du på: www.areo.nu