

● NFC

NFC (Near Field Communication - nærfeltskommunikasjon) er et innovativt dataoverføringssystem som gjør det mulig å overføre blodsukkerresultatene fra **GlucoMen® areo** til en smarttelefon eller nettbrett, **bare ved å plassere dem nær hverandre!**

● A. MENARINI DIAGNOSTICS APP

Nedlasting av blodsukkerdata til smarttelefonen og nettbrett **går raskt og enkelt med NFC-systemet!**

Så snart du har installert appen fra A. Menarini Diagnostics kan du:



Kunne se grafer og statistikk på blodsukkerdataene med appen **GlucoLog® Lite** app, og også sende disse per e-post til din lege eller en annen person du stoler på.



Send og del resultatene dine øyeblikkelig er tekstmelding ved hjelp av **GlucoLog® Mobil**-appen.

Initial preparation

Step 1

DOWNLOAD



Android

BlackBerry

Windows 8



- Last ned og installer A. Menarini Diagnostics apps på mobilenheten (smarttelefon og/eller nettbrett) (**GlucoLog® Lite** og/eller **GlucoLog® Mobile**) som er tilgjengelig for Android, BlackBerry og Windows 8-versjoner.

Step 2



- Aktiver **NFC**-funksjonen på din **GlucoMen® areo** måler, ved å følge disse enkle trinnene:
 1) Trykk **⏻** inn i 4 sekunder for å komme til oppsettmenyen.
 2) Trykk **▲** eller **▼** for å bla gjennom innstillingsmenyene; når du når **N**, trykk **⏻** for å gå inn.
 3) Trykk **▲** eller **▼** for å velge ON, og trykk deretter **⏻** for å bekrefte og gå ut.

Download data



- Ta **GlucoMen® areo** NFC-antennen nær (< 1 cm) antennen på den **NFC**-utstyrte enheten; dataoverføringen vil skje automatisk, og når den er ferdig, vil måleren vise "End".