

GlucoMen® areo – Pika-aloitusopas

Verensokeritason mittaaminen



Aseta uusi GlucoMen® areo -koeliuska mittarin yläosan aukkoon.



Ota verinäyte.



Aseta pisara verta koeliuskan päähän.



Mittaustulos ilmestyy näytölle 5 sekunnin kuluttua.



Paina vapautuspainiketta ja poista koeliuska hygieenisesti.



GlucoMen[®] areo – näytön ilmoitukset

Ilmoitus

Mitä se tarkoittaa?

Miten toimia?



Laitteistovirhe

Ota yhteyttä asiakas-
palveluumme



Koeliuska on vahingoittu-
nut tai likainen

Käytä uutta koeliuskaa




Verinäytevirhe

Aseta uuteen koeliuskaan
enemmän verta



Koeliuska poistettu
liian aikaisin

Toista testi uudella
koeliuskalla

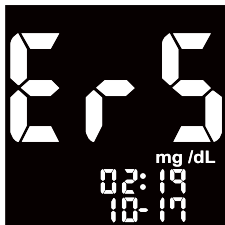

NFC-yhteys katkennut

Toista tiedonsiirto

