

Rêbera Destpêka Bilez ya GlucoMen[®] areo

Glukoza xwînê çawa tê pîvan

1



Bandeke nû ya testa GlucoMen[®] areo bînin ser aliyê jorê yê amûra pîvanê.

2



Dilopek xwîn bînin.

3



Dilopeke xwînê li ser bandê daynîn.

4



Amûra pîvanê piştî 5 çirkeyan encamê nîşan dide.

5



Ji bo ku banda testê bi awayê hijîyenîk bê derxistin, pêl bişkoka derxistinê bikin.



Peyama Nîşandanê ya GlucoMen[®] areo

Peyam

Wateya vê peyamê çi ye?

Divê ez çi bikim?



Çewtiya reqalavê

Bi tîma me ya xizmetê re
peywendiyê çêke



Banda testê xirab e

Bandeke testê ya nû bi
kar bîne




Çewtiya xwîna mînak

Zêdetir xwîn daynin ser
şerîdeke nû



Banda testê pir zû hat
rakirin

Testê bi bandeke nû
dîsa çêkin

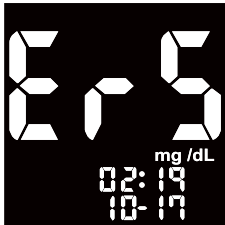

Girêdana NFC qut bû

Ragihandinê dubare bikin



Gilla GlucoMen på Facebook
www.areo.nu

